

## Einstellungsempfehlung für CAD Software 3Shape / CS1

**Passungsparameter**

<b>Zirkon:</b>		<b>Zement-</b>	<b>Vertikaler</b>	<b>Horizontaler</b>	<b>Übergangs-</b>
		<b>spalt</b>	<b>Spalt</b>	<b>Spalt</b>	<b>linie</b>
Einzelkronen	Front	0,1	0,03-0,05	0,03-0,05	1
	Seitenzahn	0,1	0,03-0,05	0,03-0,05	0,5-1,5
Verblockte Kronen	Front	0,1	0,03-0,05	0,03-0,05	0,5-1,0
	Seitenzahn	0,1	0,03-0,05	0,03-0,05	0,5-1,0
Brücken	Front	0,1	0,03-0,05	0,03-0,05	0,5-1,0
	Seitenzahn	0,1	0,03-0,05	0,03-0,05	0,5-1,0
Primär TK		0,1	0,03-0,05	0,03-0,05	0,5-1,0

**Käppchenparameter -Verbinderquerschnitt**

<b>Wand-</b>	<b>Rand-</b>	<b>Rand-</b>	<b>Verbinder</b>
<b>stärke</b>	<b>winkel</b>	<b>dicke</b>	
0,5	65°	0,15	
0,6	65°	0,15	
0,5	65°	0,15	Mind 7
0,6	65°	0,15	Mind 8
0,5	65°	0,15	Mind 8
0,6	65°	0,15	Mind 9
0,5	45-80°	0,2-2,0	

alle Angaben in mm  
 Stand Februar 2010  
 Aktualisierungen entnehmen Sie bitte dem Helpcenter auf [www.cadstar.at](http://www.cadstar.at)



# Einstellungsempfehlung für CAD Software 3Shape / CS1

**Passungsparameter**

<b>Titan:</b>		<b>Zementspalt</b>	<b>Vertikaler Spalt</b>	<b>Horizontaler Spalt</b>	<b>Übergangslinie</b>
Einzelkronen	Front	0,02	0,05-0,07	0,05-0,07	1
	Seitenzahn	0,02	0,05-0,07	0,05-0,07	0,5-1,5
Verblockte Kronen	Front	0,02	0,05-0,07	0,05-0,07	0,5-1,0
	Seitenzahn	0,02	0,05-0,07	0,05-0,07	0,5-1,0
Brücken	Front	0,02	0,05-0,07	0,05-0,07	0,5-1,0
	Seitenzahn	0,02	0,05-0,07	0,05-0,07	0,5-1,0
Primär TK		0,02	0,05-0,07	0,05-0,07	0,5-1,0

**Käppchenparameter -Verbinderquerschnitt**

<b>Wandstärke</b>	<b>Randwinkel</b>	<b>Randdicke</b>	<b>Verbinder</b>
0,3	65°	0,1	
0,4	65°	0,1	
0,3	65°	0,1	Mind 7
0,4	65°	0,1	Mind 8
0,3	65°	0,1	Mind 7
0,4	65°	0,1	Mind 9
0,4	45-80°	0,2-2,0	

alle Angaben in mm  
Stand Februar 2010  
Aktualisierungen entnehmen Sie bitte dem Helpcenter auf [www.cadstar.at](http://www.cadstar.at)



## Einstellungsempfehlung für CAD Software 3Shape / CS1

**Passungsparameter**

CoCr:		Zement- spalt	Vertikaler Spalt	Horizontaler Spalt	Übergangs- linie
Einzelkronen	Front	0,02	0,06-0,10	0,06-0,10	1
	Seitenzahn	0,02	0,06-0,10	0,06-0,10	0,5-1,5
Verblockte Kronen	Front	0,02	0,06-0,10	0,06-0,10	0,5-1,0
	Seitenzahn	0,02	0,06-0,10	0,06-0,10	0,5-1,0
Brücken	Front	0,02	0,06-0,10	0,06-0,10	0,5-1,0
	Seitenzahn	0,02	0,06-0,10	0,06-0,10	0,5-1,0
Primär TK		0,02	0,06-0,10	0,06-0,10	0,5-1,0

**Käppchenparameter -Verbinderquerschnitt**

Wand- stärke	Rand- winkel	Rand- dicke	Verbinder
0,3	65°	0,1	
0,4	65°	0,1	
0,3	65°	0,1	Mind 6
0,4	65°	0,1	Mind 7
0,3	65°	0,1	Mind 7
0,4	65°	0,1	Mind 8
0,4	45-80°	0,2-2,0	

alle Angaben in mm  
Stand Februar 2010  
Aktualisierungen entnehmen Sie bitte dem Helpcenter auf [www.cadstar.at](http://www.cadstar.at)

## Einstellungsempfehlung für CAD Software 3Shape / CS1

**Passungsparameter**

PMMA:		Zement-spalt	Vertikaler Spalt	Horizontaler Spalt	Übergangs- linie
		Einzelkronen	Front	0,01	0,06-0,10
	Seitenzahn	0,01	0,06-0,10	0,06-0,10	0,5-1,5
Verblockte Kronen	Front	0,01	0,06-0,10	0,06-0,10	0,5-1,0
	Seitenzahn	0,01	0,06-0,10	0,06-0,10	0,5-1,0
Brücken	Front	0,01	0,06-0,10	0,06-0,10	0,5-1,0
	Seitenzahn	0,01	0,06-0,10	0,06-0,10	0,5-1,0

**Käppchenparameter -Verbinderquerschnitt**

Wand- stärke	Rand- winkel	Rand- dicke	Verbinder
0,6	65°	0,2	
0,6	65°	0,2	
0,6	65°	0,2	Mind 8
0,6	65°	0,2	Mind 8
0,6	65°	0,2	Mind 9
0,6	65°	0,2	Mind 9

alle Angaben in mm  
Stand Februar 2010  
Aktualisierungen entnehmen Sie bitte dem Helpcenter auf [www.cadstar.at](http://www.cadstar.at)